

管理 No.

発行日 平成 26 年 3 月 12 日

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000				製造番号: 100162
作業年月日	平成 26 年 3 月 12 日				作業時間: 1.5 Hr
顧客名	井戸内科クリニック				TEL: 0868-22-2101
所在地	岡山県津山市山下101番地				担当 様
販売店	株式会社津山医研				担当 平岡 様
納入年月日	平成 23 年 1 月 21 日	保証期間	内 □ 外 □	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検	☐	3 年 3 回目	定期点検シート記入 ☒
出張・引取	修 理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロツク	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 454
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了) 暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 1249	更新 (リフト) (実施)・未実施	殺菌: 2053	殺菌+7L: 1663
	リークチェック: 1339	自己洗浄: 883	7L-1L単独: 4	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
濃度計ファルター		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

26 年 3 月 12 日

ご署名

井戸清仁



修理業者

新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8

TEL: 086-235-0323

責任技術者



作業者

