

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20140520
発行日 平成 26年 5月 20日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号:	300088	
作業年月日	平成26年 5月 20日		作業時間:	0.5	Hr
顧客名	さかえ外科内科クリニック 様		TEL:	0866-93-8800	
所在地	岡山県総社市真壁212		担当	様	
販売店	めいほうメディカル株式会社 様		担当	様	
納入年月日	平成 25年 11月15日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品		
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐			
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

5/19 14:46 オゾン水生成注意 (E:110)

不具合原因、作業内容

オゾン水濃度計用のフィルタが詰まったことが原因で
上記「注意」がとまりました。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ ホンベ3分 0.4MPa	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☐ 未	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 786
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☐ 未
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

フィルタで交換して後回ししました。

装置 情報	交換後運転回数： 617		更新 (リセット) 実施・未実施	消毒： 287	消毒+7L： 332
	リークチェック： 296		自己洗浄： 143	7L単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

26 年 5 月 20 日

ご署名

印

修理業者 株式会社 IHIシバウラ 岡山事業所
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者

作業者

