

管理 No.

保守点検・修理 報告書

発行日 平成26年 5月29日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000			製造番号：100262
作業年月日	平成 26年 5月 29 日			作業時間：1.0 Hr
顧客名	津山第一病院			TEL：0868-28-2211
所在地	岡山県津山市中島438番地			担当 様
販売店	株式会社津山エムアイ			担当 国米 様
納入年月日	平成23年 4月 25日	保証期間	内 □ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検	□	3 年 3回目
出張・引取	修 理	□	定期点検シール記入 ☒	
			修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒	
酸素ライオン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒	
アルコールライオン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 552	
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒	
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒	
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm	
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒	
清掃	正常 ☒	清掃 □	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒	
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐	

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数：	513	更新 (リフト) 実施 ☒ 未実施	殺菌：1251	殺菌+7L：432
	リークチェック：	260	自己洗浄：	173	7L単独：58

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
濃度計ライルター		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

26年 5 月 30 日

ご署名 井上 富弥江 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8
TEL：086-235-0323

責任技術者	作業者
	