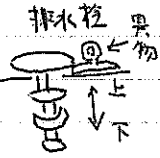


保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成 25 年 6 月 24 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100353	
作業年月日	平成 25 年 6 月 24 日		作業時間	1.0 Hr	
顧客名	かもだ内科クリニック		TEL	0875-23-4976	
所在地	香川県観音寺市坂本町7丁目10-10		担当	様	
販売店	株式会社メディカルサービス		担当	様	
納入年月日	平成 24 年 8 月 10 日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守 点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☐		
出張 ・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
H25.5.30 水位低下異常、殺菌時給水異常 ← 2回発生 : 6.11 殺菌時給水異常 ← 2回発生 : 6.11 以降 5回 発生し、全て正常終了している。	
不具合原因、作業内容	
給水異常の原因は排水栓に異物が引っかかり、完全に閉じない状態になり、 給水した水が排水側に流失したためと思われます。(左図)	
	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☐	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 436
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒ 静圧 0.45MPa 最小 0.5以上	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒ フジ純正品	正常 ☐
作業結果 (完了)、暫定処理など、連絡事項、特記事項	
異常ありませんでした。次回点検日は今年の 8/10 頃です。	

装置 情報	交換後運転回数: 103	更新 (リット) 実施 ・未実施	殺菌: 4	殺菌+7L: 102
	リークチェック: 0	自己洗浄: 98	7L+7L単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
なし		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄	25 年 6 月 24 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	

修理業者 株式会社 IHI シバウラ 岡山事業所
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者	作業者
	H25-6.24 中澤