

江崎医院 御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者： 中澤-裕

点検年月日	平成26年7月7日	機種名	ONW-10	製造機番	:001578
設置場所	1 F 内視鏡室			TEL	: 087-894-0001
設置時期	平成20年 3月 26日	運転回数	1206	御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	0.5	mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	濃度:	94.2	%	流量: 0.77 L/min 圧力: 0.115~0.192 MPa
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	排水口、Z	清掃	☒	
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品			数量	コメント
吸着筒	交換	☒	1	総合点検5年目 1回目実施 異常ありませんでした。
吸湿筒	交換	☒	1	
ドレン用フィルタ	交換	☒	1	
オゾン分解触媒	交換	☒	1	
	交換	☐		
	交換	☐		

平成26年 7 月 7 日

ご署名 福井 美恵

印

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。