

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成26 年 9月24 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号：100449
作業年月日	平成 26 年 9 月24 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	守安外科胃腸科整形外科クリニック		TEL：086-422-2511
所在地	岡山県倉敷市宮前380-60		担当 様
販売店	めいほうメディカル株式会社		担当 守屋 様
納入年月日	平成 24年 8 月 29 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
定期保守点検実施			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 556
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数： 270	更新 (リセット) (実施) ・ 未実施	殺菌： 25	殺菌+7L： 542
	リークチェック： 1	自己洗浄： 531	アルコール単独： 0	エア単独： 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手 (本体側)		☒	1
排水栓		☒	1	コネクタ継手 (コネクタ側)		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	
・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・ 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
26 年 9 月 24 日	
ご署名 尾見 ユカリ	
	

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町 1-7-8
TEL：086-235-0323

責任技術者	作業者
	