

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成26年9月30日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100353
作業年月日	平成 26年 9月 30日		作業時間: 1.2 Hr
顧客名	かもだ内科クリニック		TEL: 0875-23-4976
所在地	香川県観音寺市坂本町7丁目10-10		担当 様
販売店	株式会社メディカルサービス		担当 藤井専務 様
納入年月日	平成 24年 8月 10 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2年2回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 483
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了)、暫定処理など、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 140	更新 (リセット) (実施) ・未実施	殺菌: 7	殺菌+アル: 256
	リークチェック: 1	自己洗浄: 249	アルコール単独: 0	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手 (本体側)		☒	2
排水栓		☒	1	コネクタ継手 (コネクタ側)		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

26年9月30日
かもだ内科クリニック
理事長 鴨田匡史
ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8
TEL: 086-235-0323

責任技術者

作業者

