

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26年8月26日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100075
作業年月日	平成 26年 8月26日		作業時間: 2.0 Hr
顧客名	佐藤病院		TEL: 086-263-6622
所在地	岡山県岡山市南区築港栄町2-13		担当 様
販売店	西日本メディカルリンク(株)		担当: 光森 様
納入年月日	平成22年8月19日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4年 4回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

定期保守点検実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 444
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 631 → 0 更新 (リセット) (実施) ・ 未実施	殺菌: 369	殺菌+7L: 1730
	リークチェック: 1805	自己洗浄: 963	7L単独: 154

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手 (本体側)		☒	2
排水栓		☒	1	コネクタ継手 (コネクタ側)		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

426 年 8 月 26 日

ご署名 藤原和真 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島町 1-7-8
TEL: 086-235-0323

責任技術者 作業者

