

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26 年 11 月 5 日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S	製造番号: 300088
作業年月日	平成 26 年 11 月 5 日	作業時間: 1、1 Hr
顧客名	さかえ外科内科クリニック	TEL: 0866-93-8800
所在地	岡山県総社市真壁 212	担当 様
販売店	めいほうメディカル株式会社	担当 守屋 様
納入年月日	平成 25 年 10 月 29 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1 年 1 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 577
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 1092	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌: 487	殺菌+アル: 607
	リークチェック: 543	自己洗浄: 283	アルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	排水フィルター		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

H26 年 11 月 5 日

ご署名

櫻本

忍



修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町 1-7-8
TEL: 086-235-0323

責任技術者

作業者

