

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成26年12月3日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100332	
作業年月日	平成26年12月3日		作業時間	1、1 Hr	
顧客名	井原第一クリニック		TEL	086-259-1551	
所在地	岡山県井原市高屋127-1		担当	様	
販売店	株式会社小沢医科器械		担当	泉 様	
納入年月日	平成23年11月16日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	3年3回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 602
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒ Cビアリ	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了) 暫定処理など、連絡事項、特記事項

トレー へびあ)

装置 情報	交換後運転回数: 998	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌: 813	殺菌+アル: 843
	リークチェック: 588	自己洗浄: 446	アルコール単独: 10	エア単独: 3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

H26年12月3日

ご署名

森下



修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8
TEL: 086-235-0323

責任技術者

作業者

