

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20140807

発行日 平成 26年 8月 7日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号:	300177
作業年月日	平成26年 8月 7日		作業時間:	Hr
顧客名	西高松脳外科・内科クリニック 様		TEL:	087-832-8811
所在地	香川県高松市郷東町134-1		担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成25年12月19日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

8/1, 8/4 排水注意 (E111)

※ 3/14, 3/24 も発生

不具合原因、作業内容

排水フィルターが詰まって注意 (E111) が出ました。

排水フィルターで改良型に交換しました。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ ポンパ 5MPa	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 ー
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒ フジコネクタ 使用
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了)、暫定処理など、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数： 93		更新 (リセット) 実施・未実施		消毒： 7	消毒+7L： 88
	リークチェック： 5		自己洗浄： 77		アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
排水フィルター		☒	1			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名



印

修理業者 株式会社 IHIシバウラ 岡山事業所
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者	作業者