

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

11-06079

No. 150206

配布先	客先	納入先	新鋭工業株式会社 岡山支店 殿	機種	OED-1000
環営	環品	顧客名	井原第一クリニック 様	機番	100332
		所在地	岡山県井原市高屋 127-1	納入日	平成 23 年 11 月 16 日
		点検者	中澤 一裕	作業時間	
		受付日	平成 26 年 12 月 29 日		
計	3	返送先	納入先と同じ	出荷日	平成 27 年 2 月 6 日

修理依頼・不具合内容

水漏れ（多量）



不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

オゾン水製造側のシリコンチューブが劣化して亀裂が発生し、そこから漏れた水がコントロール基板にかかった状態でした。亀裂が発生したチューブの他に周辺のチューブとコントロール基板を念のために交換しました。

写真 1：交換部品一式

写真 2：オゾン水製造側チューブ

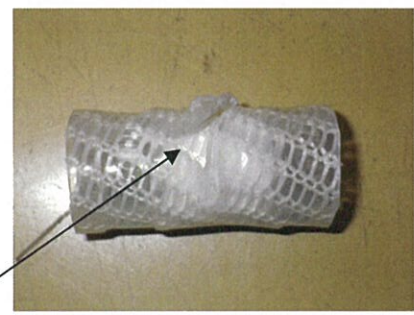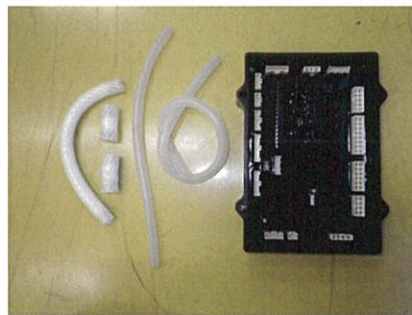

亀裂部

〔2〕修理・点検内容

- 1：部品交換（下表および写真をご参照ください）
- 2：性能確認・・・正常 オゾン水濃度：0.71ppm 濃度計パルス信号：476
- 3：運転確認・・・正常
- 4：出荷時の装置情報※
殺菌：843、殺菌＋アルコール：861、リークチェック：603、自己洗浄：457
アルコール単独：12、I7単独：3

※平成 25 年 3 月 16 日タッチパネルを交換した以降の情報です

一以上一

承認

安
752-6
田

審査

中
27.2-6
澤

作成

H27.2.6
中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	コントロール基板	1 枚	
	オゾン水製造側チューブ	1 式	

（株）IHI シパウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528