

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27 年 4 月 1 日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000		製造番号	100162	
作業年月日	平成 27 年 4 月 1 日		作業時間	1.2 Hr	
顧客名	井戸内科クリニック		TEL	0868-22-2101	
所在地	岡山県津山市山下 101 番地		担当	様	
販売店	株式会社津山医研		担当	平岡 様	
納入年月日	平成 23 年 1 月 21 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	4 年 4 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 491
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 1218	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 2691	殺菌+アル: 2243
	リークチェック: 1836	自己洗浄: 1182	アルコール単独: 5	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手 (本体側)		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	コネクタ継手 (チューブ側)		☒	2
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27 年 4 月 1 日

ご署名 井戸内科クリニック



修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島町田 1-7-8
TEL: 086-235-0323

責任技術者 作業者

