

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年3月27日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000		製造番号	100637	
作業年月日	平成 27年 3 月 27 日		作業時間	1.5 Hr	
顧客名	中尾内科クリニック		TEL	0868-24-4488	
所在地	岡山県津山市沼854-6		担当	様	
販売店	株式会社小川器械		担当	遠藤部長 様	
納入年月日	平成 25年 2月 27 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 年 2回目		定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修 理 ☐		修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 565
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.75 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数： 963 更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施		殺菌： 923	殺菌＋アル： 1007
	リークチェック： 1	自己洗浄： 8	アルコール単独： 0	エア単独： 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手 (本体側)		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	コネクタ継手 (コネクタ側)		☒	2
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H27年 3 月 27日

ご署名 服部 侑希



修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島町田1-7-8
TEL : 086-235-0323

責任技術者

作業者

