

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27年 3月 25日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号:	300178
作業年月日	平成 27年 3月 25日		作業時間:	1.0 Hr
顧客名	アイシークリニック		TEL:	0877-62-0118
所在地	香川県善通寺市原田町1494番地1		担当	様
販売店	株式会社メディカルサービス		担当	藤井専務 様
納入年月日	平成 26年 2月 20日	保証期間	内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>	付属品
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/>	総合点検 <input type="checkbox"/>	1年 1回目	定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌槽 LED	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 412
オゾンセンサ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常 <input type="checkbox"/>
給水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常 <input type="checkbox"/>
水位センサー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 <input type="checkbox"/>	異常音、振動	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
清掃	正常 <input type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/>	電源コード	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
トレー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>		正常 <input type="checkbox"/>

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数:	36	更新(リセット) (実施)・未実施	殺菌:	4	殺菌+7L:	34
	リークチェック:	33	自己洗浄:	33	7Lアルコール単独:	0	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	
オゾン水濃度計		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	
濃度計フィルター		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	
オゾンセンサー		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	
排水栓		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

27年 3月 25日

ご署名 川田 恵美



修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8
TEL: 086-235-0323

責任技術者	作業者