

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 150807

配布先	納入先	新鋭工業（株） 岡山支店 殿			機種	ONW-10
客先	所在地	岡山県津山市杉宮 14-2			機番	001410
環営	ユーザー名	勝北診療所 様			納入日	平成 20 年 8 月 20 日
防品	点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	平成 27 年 6 月 19 日
	返送先	納入先と同じ			発送日	平成 27 年 8 月 6 日
計	3					

修理依頼・不具合内容

- ・平成 27 年 定期点検
- ・排水異常修理

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

排水ポンプの性能低下と配管チューブの劣化が原因でした。この部品の他に定期交換部品を交換して復旧しました。

写真 1 : No1 定期交換部品



写真 2 : No2~4 交換部品



〔2〕修理・点検内容

1. 部品交換：下表と写真をご参照ください。
2. 内部清掃
3. オゾン水濃度測定：0.43~0.53mg/L・・・正常
4. P S A（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：94.3% 酸素流量：0.75L/min 圧力：0.113~0.197MPa（AC100V, 60Hz）
5. 運転確認：異常なし。
6. インジケータ変色：異常なし
7. 運転カウンタ：1331

承認



審査



作成

H27. 8. 7
中澤

交換部品

No.	品名	数量	備考
1	定期交換部品	1 式	
	吸着筒、吸湿筒、オゾン分解触媒、ドレンフィルタ		SPS-11753
2	排水ポンプ	1 台	P-3
3	水位レベルセンサー	3 本	LVL、LVH、LVHH
4	配管チューブ、パッキン	1 式	給水、排水、ドレン系統