

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 151021

配布先	納入先	新鋭工業 株式会社 岡山支店 殿		機種	OED-1000
客先	顧客名	もりの木おおにしクリニック 様		機番	100330
環営	所在地	香川県観音寺市茂西町 1-1-41		納入日	平成 23 年 8 月 9 日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成 27 年 9 月 4 日
	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成 27 年 10 月 21 日
計	3				

修理依頼・不具合内容

- ・タッチパネルが起動したとき、画面「IHI OED-1000」のまま次に移行しない
- ・平成 27 年分 保守点検

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検および作業内容

異常が再現することを確認しました。
コントロール基板の故障が原因で、基板からタッチパネルへ信号が止まった状態でした。
このためタッチパネルの画面が「IHI OED-1000」から「処理選択」に移行しませんでした。

コントロール基板を交換して復旧しました。なお、タッチパネルは異常ありませんでした。

写真 1：コントロール基板、タッチパネル



写真 2：定期交換・校正部品一式



〔2〕作業内容

- 1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.69ppm・・・正常
- 3：運転確認・・・正常

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	コントロール基板	1 枚	
	アルコールタンクキャップ	1 個	
	定期交換部品	1 式	
	オゾン水濃度計校正、オゾンセンサ校正		濃度計信号パルス：414
	排水栓、脱気フィルタ、水槽コネクタ		
	オゾン分解触媒		

承認

安
151021
田

審査

中
151021
澤

作成

H27. 10. 21

中澤

(株) IHI シバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528