

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27年 9 月 18日

|       |                                          |                                 |                                                                  |              |                                     |
|-------|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                      |                                 | 製造番号                                                             | 100724       |                                     |
| 作業年月日 | 平成 27年 9 月 18 日                          |                                 | 作業時間                                                             | 1.0 Hr       |                                     |
| 顧客名   | 中山病院                                     |                                 | TEL                                                              | 0867-42-0371 |                                     |
| 所在地   | 岡山県真庭市久世2508                             |                                 | 担当                                                               | 様            |                                     |
| 販売店   | 株式会社津山医研                                 |                                 | 担当                                                               | 田口 様         |                                     |
| 納入年月日 | 平成 25年 9 月 11 日                          | 保証期間                            | 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品          |                                     |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> | 総合点検 <input type="checkbox"/>   | 2年 2 回目                                                          | 定期点検シール記入    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>              | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |                                                                  |              |                                     |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

## 定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |                                                                    |           |                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン     | 正常 <input type="checkbox"/>                        |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 397    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレー      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             |           | 正常 <input type="checkbox"/>                        |

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

~~アルコールランプ使用~~

|      |             |                                                                               |            |            |
|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数: 80 | 更新 (リセット) 実施 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> | 殺菌: 13     | 殺菌+アル: 157 |
|      | リークチェック: 0  | 自己洗浄: 172                                                                     | アルコール単独: 4 | エア単独: 3    |

| 交換部品名称   | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称         | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|----------|-------|-------------------------------------|----|----------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | コネクタ継続 (本体側)   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | コネクタ継続 (コネクタ側) |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| 濃度計フィルター |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |                |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |                |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| 排水栓      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |                |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27年 9 月 18 日

ご署名

田口 文子

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店  
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8  
TEL: 086-235-0323

責任技術者

作業者

大倉

高橋