

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年12月10日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	300279	
作業年月日	平成27年12月10日		作業時間	1.1 Hr	
顧客名	上里医院		TEL	0877-45-8111	
所在地	香川県坂出市江尻836-5		担当	様	
販売店	中澤氏家業株式会社		担当	小山 様	
納入年月日	平成26年12月12日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	1年1回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☐	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☐
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数	113	更新(リセット)実施・未実施	殺菌	16	殺菌+7L	99
	リークチェック	2	自己洗浄	103	7L単独	0	エア単独

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27年12月10日

ご署名



修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8
TEL: 086-235-0323

責任技術者

作業者

