

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27 年10 月26 日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号:	300080	
作業年月日	平成 ²⁷ 26 年 10 月 26 日		作業時間:	1.2 Hr	
顧客名	たなか内科診療所		TEL:	086-259-1551	
所在地	岡山県岡山市北区田中183番地102		担当	様	
販売店	ティーエスアルフレッサ株式会社		担当	福山 様	
納入年月日	平成 25年 10 月 25 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	2 年 2 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 492
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 250	更新(リセット)実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌: 52	殺菌+7L: 356
	リークチェック: 0	自己洗浄: 60	7Lアルコール単独: 3	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手(本体側)		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	コネクタ継手(コネクタ側)		☒	2
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27 年 10 月 26 日

ご署名

田中理香



修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8
TEL: 086-235-0323

責任技術者

作業者

