

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27 年 11 月 10 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100370	
作業年月日	平成 27 年 11 月 10 日		作業時間	1-1 Hr	
顧客名	中島病院		TEL	0868-22-8251	
所在地	岡山県津山市田町 122		担当	様	
販売店	株式会社メディックス		担当	中江 様	
納入年月日	平成 24 年 6 月 20 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3 年 4 回目		定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 574
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☐	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☐ 清掃 ☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☐ ヒビあり	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☐		正常	☐

作業結果 (完了) 暫定処理など、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 1709 更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 4974	殺菌+7L: 3450
	リークチェック: 1	自己洗浄: 962	7Lコル単独: 11
			エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手 (本体側)		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	コネクタ継手 (コネクタ側)		☒	2
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H27 年 11 月 10 日

ご署名 福井 万以子



修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町 1-7-8
TEL: 086-235-0323

責任技術者

作業者

