

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27 年 12 月 11 日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	300398	
作業年月日	平成 27 年 12 月 11 日		作業時間	1.1	Hr
顧客名	中西クリニック		TEL	0868-27-7200	
所在地	岡山県津山市東一宮 43-13		担当	様	
販売店	株式会社津山医研		担当	中務	様
納入年月日	平成 26 年 12 月 17 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	1 年 1 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 281
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数:	63 (更新 (リセット) 実施) ・未実施	殺菌:	4	殺菌+7L:	62
	リークチェック:	60	自己洗浄:	57	7Lアルコール単独:	1
					エア単独:	0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H27 年 12 月 11 日

ご署名

中西夢輔



修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町 1-7-8
TEL: 086-235-0323

責任技術者

作業者

