

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年12月16日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	300177	
作業年月日	平成 27年 12 月 16 日		作業時間	1.2 Hr	
顧客名	西高松脳外科・内科クリニック		TEL	087-832-8811	
所在地	香川県高松市郷東町134-I		担当	様	
販売店	中澤氏家薬業株式会社		担当	小山 様	
納入年月日	平成 25年 12 月 19 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	2 年 2 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 457
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数：227	更新（リセット）実施・未実施	殺菌：7	殺菌+7L：375
	リークチェック：7	自己洗浄：353	7Lアルコール単独：0	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手（本体側）		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	コネクタ継手（コネクタ側）		☒	2
濃度計フィルター		☒	1	排水フィルター		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2015年12月16日

ご署名

北野 21811



印

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8
TEL: 086-235-0323

責任技術者

作業者

