

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27 年 10 月 15 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100329	
作業年月日	平成 27 年 10 月 15 日		作業時間	1.5	Hr
顧客名	みうら内科循環器科		TEL	0865-42-3311	
所在地	岡山県浅口市金光町占見 79-1		担当	様	
販売店	角田医療器株式会社		担当	薄田 様	
納入年月日	平成 23 年 8 月 8 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	4 年 4 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
定期保守点検実施	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 382
オゾンセンサー 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数: 57	更新 (リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌: 95	殺菌+7L: 71
	リークチェック: 0	自己洗浄: 151	アルコール単独: 0	エア単独: 4

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手 (本体側)		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	コネクタ継手 (コネクタ側)		☒	2
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	平成 27 年 10 月 15 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 三浦 健太郎	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島町 1-7-8
TEL: 086-235-0323

責任技術者	作業者
大倉	三浦