

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成28年 1月21日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	300512	
作業年月日	平成 28年 1月 21 日		作業時間	1.5 Hr	
顧客名	のむら内科循環器消化器クリニック		TEL	087-816-8088	
所在地	香川県高松市香川町川東上字漆原1802-7		担当	様	
販売店	株式会社キタムラメディカル		担当	松原 様	
納入年月日	平成 27年 3 月 6 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	1 年 1 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修 理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 645
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 222	更新 (リット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌: 6	殺菌+7L: 220
	リークチェック: 0	自己洗浄: 141	7Lアルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	排水フィルター		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H28年 1 月 21 日

署名 野村 昌弘 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8
TEL: 086-235-0323

責任技術者

作業者

