

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 160325

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 岡山支店 殿		機種	OED-1000
客先	顧客名	井戸内科クリニック 様		機番	100162
環営	所在地	岡山県津山市山下 101 番地		納入日	平成 23 年 1 月 21 日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成 27 年 12 月
	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成 28 年 3 月 11 日
計	3				

修理依頼・不具合内容

- ・水漏れ
- ・定期保守点検

不具合原因（故障箇所）と処置

修理遅れまして大変申し訳ありませんでした。以下ご報告いたします

〔1〕点検および作業内容

水漏れは再現しませんでした。水が漏れた形跡を確認しました。
殺菌チューブから出た水が、直接アッパーカバーにかかると水が漏れることがあります。
このためカバー側を再シールして復旧しました。

写真 1：水漏れ箇所



写真 2：交換部品一式



〔2〕作業内容

- 1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.72ppm・・・正常
- 3：運転確認・・・正常

承認
安 16.3.25 田
審査
中 16.3.25 澤
作成
H28. 3. 25 中澤

交換部品			
部品番号	部品名称	数量	備考
	定期交換部品	1 式	
	オゾン水濃度計、オゾンガスセンサ		濃度計パルス：412
	排水栓、脱気フィルタ		
	マニホールド周辺チューブ	1 式	
	タッチパネルバリスタ追加	1 本	

（株）IHIシパウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地 1 7 0 - 6 TEL:086-944-6528