

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成28年6月6日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号 : 300179
作業年月日	平成28年6月6日		作業時間 : 1.5 Hr
顧客名	やまもとクリニック		TEL : 086-473-5151
所在地	岡山県倉敷市児島元浜町783-5		担当 様
販売店	株式会社セイエル		担当 早瀬 様
納入年月日	平成28年3月25日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2年2回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

定期点検実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 518
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数 : 718	更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施	殺菌 : 266	殺菌+アル : 764
	リークチェック : 3	自己洗浄 : 485	アルコール単独 : 3	エア単独 : 3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手（本体側）		☒	1
排水栓		☒	1	コネクタ継手（コネクタ側）		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	バリスタ		☒	1
オゾン水濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

平成28年 6 月 6 日

ご署名

山本 久恵

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8
TEL : 086-235-0323

責任技術者

作業者

