

保守点検・修理 報告書

発行日：平成28年8月16日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300277
作業年月日	平成28年8月16日		作業時間：
顧客名	伊木診療所 様		TEL：086-429-2300
所在地	岡山県倉敷市亀山775-1		院長 様
販売店	有限会社マツモトマ [®] イタル		松本 様
納入年月日	平成26年6月10日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 2 年 2 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハルス数 58
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 2.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
☐		☐	
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数： 85	更新（リセット）（実施）・未実施	殺菌/消毒： 4	殺菌/消毒+7L： 190
	リークチェック： 1	自己洗浄： 186	7Lアルコール単独： 0	エア単独： 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒		吸盤		☒	
排水栓		☒		接続コネクタ；水槽側		☒	
オゾン水濃度計		☒		接続コネクタ；チューブ側		☒	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒		バリスタ		☒	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄	28 年 8 月 16 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	ご署名 伊木勝道 印
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	

修理業者	新鋭工業 株式会社 岡山支店 岡山県岡山市北区中島町1-7-8 TEL：086-235-0323	責任技術者	作業者
			