

保守点検・修理 報告書

管理 No.

20160705

発行日：平成 28 年 7 月 5 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300278
作業年月日	平成 28 年 7 月 5 日	作業時間： Hr
顧客名	岡本医院 様	TEL： 0790-88-0605
所在地	兵庫県佐用郡佐用町家内42	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	平成 26 年 8 月 22 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 年 2 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
3/6 消毒時給水異常 ×3回発生 } 全て排水栓が閉まっていたため 5/28 消毒機異常 } 水槽の水が流失して異常になったと思われる。	
不具合原因、作業内容	
H28年 定期保守点検	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒ ボンパッキン 9.0MPa	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 488
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒ G1/2-Q260	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
作業結果 (完了)、暫定処理など、連絡事項、特記事項	

装置情報	交換後運転回数： 520 更新 (リット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒： 461	殺菌/消毒+7L： 529
	リークチェック： 2 自己洗浄： 416	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	1
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	1
ポン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコール消毒液		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	バックスアップ		☐	

お客様ご確認署名欄	28 年 7 月 5 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	医療法人社団 岡本医院

修理業者 株式会社 IHI シバウラ
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL:086-944-6528

責任技術者	作業者
中 澤 16.7-5	中 澤 16.7-5