

勝北診療所 御中

点検確認書

株式会社 IH|シバウラ  
環境事業部

点検担当者：新鋭工業 川上

点検年月日	平成 28年 8月 25日	機種名	ONW-10	製造機番	001410
設置場所	岡山県津山市杉宮14-2			TEL :	0868-29-2324
設置時期	平成 2008年8月20日	運転回数		御対応者	

点検項目	点検結果				
スイッチ類					
電源釦	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>			
ファイルタリセット釦	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>			
運転/停止釦	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>			
アルコールモード釦	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>			
ランプ類					
操作パネル	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>			
蛍光灯	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>			
洗浄動作					
フタロック	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>			交換 <input type="checkbox"/>
給水	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>			交換 <input type="checkbox"/>
細管洗浄	順方向	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>
細管洗浄	逆方向	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>
細管洗浄	エアパージ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>
アルコールフラッシュ		正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>
オゾン分解ファン		正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>
排水		正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>
異常音、振動		正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>
性能確認					
オゾン水濃度	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	濃度 : 0.3 mg/L 0.120~0.216			
オゾンインジケータ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>				
酸素発生	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	濃度 : 91.2 %	流量 : 0.78 L/min	圧力 : 0.912	MPa
水漏れ確認					
装置外					
装置内	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>			交換 <input type="checkbox"/>
清掃					
外装	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	清掃 <input type="checkbox"/>			
内部	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	清掃 <input type="checkbox"/>			
洗净コネクタ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>			交換 <input type="checkbox"/>
洗净チューブ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>			交換 <input type="checkbox"/>
交換部品		数量	コメント		
吸着筒	交換 <input type="checkbox"/>				
吸湿筒	交換 <input type="checkbox"/>				
ドレン用フィルタ	交換 <input checked="" type="checkbox"/>				
オゾン分解触媒	交換 <input checked="" type="checkbox"/>				
洗净チューブ	交換 <input type="checkbox"/>				

※：本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 吉永真也 印