

保守点検・修理 報告書


管理 No. 20150916

発行日 平成 27年 9月 16 日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S	製造番号:	300513
作業年月日	平成 27年 9月 10日	作業時間:	Hr
顧客名	石川ヘルスクリニック 様	TEL:	0880-22-0002
所在地	高知県高岡郡四万十町榊山町7-23	担当	様
納入年月日	平成 27年 3月 13日	保証期間	内 ☒ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☐
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

9/15 2回目の運転で 起動時 蛇口異常 (E201)

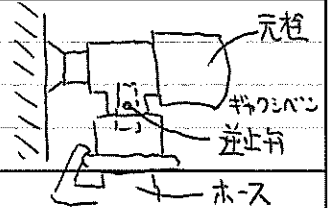

不具合原因、作業内容

水圧が高く、運転開始時に一気に水が流れると蛇口に内蔵されて
いる 止水弁が働いて水を止めてしまいました。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☐
酸素ライン	正常 ☐	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ バルブ数
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☒ 元栓の周位置にテープ貼付	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☐
水位センサー	正常 ☒ 調整	オゾン濃度	正常 ☒ 0.66 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☐
トレー	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☐		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

止水弁が働かないよう、蛇口の開きかたで、ヤセ紋る位置に
テープで貼りました。この位置で様子を見て下さい

装置 情報	交換後運転回数: 237	更新 (リット) 実施・未実施	消毒: 126	消毒+7L: 115
	リークチェック: 2	自己洗浄: 111	7L単独: 0	エア単独: 6

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

1427 年 9 月 16 日

〒786-0008

高知県高岡郡四万十町榊山町7-23

ご署名 石川ヘルスクリニック



医師 石川 哲

作業者

修理業者 株式会社 IHI シバウラ 岡山事業所

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6

TEL: 086-944-6528

TEL 0880 (22) 0002 FAX 0880 (22) 4317

