

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成28年12月6日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号 : 300279
作業年月日	平成28年12月6日		作業時間 : 1.5 Hr
顧客名	上里医院		TEL : 0877-45-8111
所在地	香川県坂出市江尻町836-5		担当 様
販売店	中澤氏家薬業株式会社		担当 小山 様
納入年月日	平成 26年 12 月 12 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修 理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 663
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.90 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常ありません。			

装置 情報	交換後運転回数 : 103	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌 : 23	殺菌+7L : 195
	リークチェック : 2	自己洗浄 : 200	7Lアルコール単独 : 0	エア単独 : 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手（本体側）		☒	1
排水栓		☒	1	コネクタ継手（コネクタ側）		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
H28 年 12 月 16 日 ご署名 上里医院 上里	

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
 岡山県岡山市北区中島田町1-7-8
 TEL : 086-235-0323

責任技術者	作業者
	