

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成28年11月7日

|       |                                                                             |                                                                       |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S                                                        |                                                                       | 製造番号：300180      |
| 作業年月日 | 平成28年11月7日                                                                  |                                                                       | 作業時間：1.5 Hr      |
| 顧客名   | 栗井内科医院                                                                      |                                                                       | TEL：086-953-0617 |
| 所在地   | 岡山県岡山市東区瀬戸町万富622-1                                                          |                                                                       | 担当 副院長 様         |
| 販売店   | 株式会社サンキ                                                                     |                                                                       | 担当 物部 様          |
| 納入年月日 | 平成 26年 3 月 24日                                                              | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品              |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>                         |                  |
| 出張・引取 | 修 理 <input type="checkbox"/>                                                | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                       |                  |

|                           |                                                                               |           |                                                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴           |                                                                               |           |                                                    |
|                           |                                                                               |           |                                                    |
| 不具合原因、作業内容                |                                                                               |           |                                                    |
|                           |                                                                               |           |                                                    |
| 点検項目                      |                                                                               |           |                                                    |
| フタロック                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌槽 LED   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | エアライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 573    |
| オゾンセンサ                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 細管送水ライン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排気ライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン濃度     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.72 ppm |
| 水漏れ確認                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレー                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌チューブ類   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        |           | 正常 <input type="checkbox"/>                        |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 |                                                                               |           |                                                    |
| 特に異常はありませんでした。            |                                                                               |           |                                                    |

|          |             |                                                                              |           |           |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数：362 | 更新（リセット）実施 <input checked="" type="checkbox"/> ・未実施 <input type="checkbox"/> | 殺菌：26     | 殺菌+アル：338 |
|          | リークチェック：0   | 自己洗浄：2                                                                       | アルコール単独：1 | エア単独：1    |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称        | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|---------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | コネクタ継手（本体側）   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | コネクタ継手（コネクタ側） |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | バリスタ          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン水濃度計フィルター |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |               |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |               |       | <input type="checkbox"/>            |    |

|                                                                                                                            |  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| お客様ご確認署名欄                                                                                                                  |  | 28 年 11 月 7 日 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。</li> <li>本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。</li> </ul> |  | 栗井 一也         |
| ご署名                                                                                                                        |  |               |

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店  
岡山県岡山市北区中島町1-7-8  
TEL：086-235-0323

責任技術者 作業者

