

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____
発行日 平成28年12月15日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号 : 300177
作業年月日	平成 28 年 12 月 15 日		作業時間 : 2.5 Hr
顧客名	西高松脳外科・内科クリニック		TEL : 087-832-8811
所在地	香川県高松市郷東町 1 3 4 -1		担当 様
販売店	中澤氏家薬業株式会社		担当 小山 様
納入年月日	平成 25 年 12 月 19 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修 理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 769
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

牛乳に異常はありませんでした。
排水フィルターを取り除きました。保管お願いいたします。

装置 情報	交換後運転回数 : 286	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌 : 8	殺菌+アル : 660
	リークチェック : 7	自己洗浄 : 633	アルコール単独 : 0	エア単独 : 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	バリスタ		☒	1
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

28 年 12 月 15 日

ご署名 山本 理恵 

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店 岡山県岡山市北区中島田町 1-7-8 TEL : 086-235-0323	責任技術者	作業者
		