

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成28年/2月/6日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100456
作業年月日	平成 年 月 日		作業時間: 2.5 Hr
顧客名	ふくま内科消化器科クリニック		TEL: 087-870-1311
所在地	香川県高松市牟礼町牟礼2560-11		担当 様
販売店	中澤氏家業株式会社		担当 小山 様
納入年月日	平成24年11月19日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☐ アルコールキャップ破損	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 596
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒ ヒビアリ	殺菌チューブ類	正常 ☒ 全3本の交換
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニュアルドレージ	正常 ☒ 交換

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 369	更新（リセット）実施・未実施	殺菌: 273	殺菌+アル: 1494
	リークチェック: 6	自己洗浄: 1030	アルコール単独: 2	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手（本体側）		☒	2
排水栓		☒	1	コネクタ継手（コネクタ側）		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	バリスタ		☒	1
オゾン水濃度計フィルター		☒	1	マニュアルドレージ		☒	1セット
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

福岡 鈴子



修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島町1-7-8
TEL: 086-235-0323

責任技術者



作業者

