

器具除染用洗浄機 IC Washer点検報告書

お客様用

お客様 お客様	名称	製造番号	点検実施日	ご承認印	
	住所	運送回数	点検実施者		
	納入場所	サービス形態	モリタ担当		

ドア機能

- X
- ☒ ドア開閉動作
 - ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
 - ☒ ドアフックの掛かり・押付け強さ
 - ☒ ドア締め付けスイッチの作動
 - ☒ インターロックの作動
 - ☒ テンションスプリングの取付け・伸び
 - ☒ ドアパネルの取付け・キズ
 - ☒ ドアヒンジの動作
 - ☒ ドア手動開放レバーの作動
 - ☒ ドア開放スイッチONの際の開放量

薬剤ポンプ(洗剤・仕上剤)

- X
- ☒ 薬剤レベルセンサー配線、配管取付
 - ☒ 薬剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
 - ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
 - ☒ ローラーポンプの作動
 - ☒ 薬剤投入量
 - ☒ 薬剤レベルセンサーの作動

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取付け
- ☒ 乾燥ファンの作動・異音
- ☒ 乾燥ヒータの取付け状態・配線の劣化
- ☒ 乾燥ヒータの作動
- ☒ プレフィルタのつまり・汚れ
- ☒ HEPAフィルタのつまり・汚れ

配管系

- ☒ 外部給水・給湯配管の継手・ホースの損傷・漏れ
- ☒ 外部排水継手・ホースの損傷・漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 乾燥回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 給水弁の作動・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動・漏れ
- ☒ 水位圧力スイッチの取付け・漏れ
- ☒ 給水タンク・凝縮タンクの取付け・漏れ

ポンプ

-
- ☒ 循環ポンプの取付け・漏れ
 - ☒ 循環ポンプの作動・異音
 - ☒ 防振ゴムの取付け・劣化
 - ☒ 排水ポンプの取付け・漏れ
 - ☒ 排水ポンプの作動・異音
 - ☒ 凝縮排水ポンプの取付け・漏れ
 - ☒ 凝縮排水ポンプの作動・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れ
- ☒ 槽内LEDの点灯
- ☒ 洗浄アームの回転
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのへたり・漏れ
- ☒ 排水口フィルタの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒータの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒータ過昇防止器の取付け・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示
- ☒ 電源スイッチの作動
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続
- ☒ メモリーカードへの書き込み確認
- ☒ 圧力センサーの取付け
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色(加温・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの固定・ゴムシートの設置
- ☒ 外装の汚れ・損傷
- ☒ 制御パネルカバーの汚れ・損傷

消耗品の交換

- ☒ ドアパッキン
- ☒ プレフィルタ
- ☒ HEPAフィルタ
- ☒ 洗剤・仕上剤ポンプチューブ

性能評価

- ☒ インジケータによる残法判定(TOSI)

運転確認

☒ 合 ☐ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎をつける。

交換部品	数量
ドアパッキン	1
「下	1
室内スリット	1
洗剤ポンプホース	2
70℃フィルター	1
HEPAフィルター	1

※ 点検日 8月10日 11時30分
8020 ~

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-844-6528

FAX:086-942-8030