

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成29年12月11日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号：100332
作業年月日	平成29年12月11日		作業時間：1時間
顧客名	井原第一クリニック 様		TEL：0866-67-0331
所在地	岡山県井原市高屋127-1		院長 様
販売店	株式会社小沢医科器械		泉 様
納入年月日	平成23年11月16日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5年 1回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 363
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒ ※ビビ器あり	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数：1425	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒：2029/12	殺菌/消毒+7L：2029/12
	リークチェック：1682	自己洗浄：12058	アルコール単独：12	エア単独：12

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	バリスタ		☐	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		年	月	日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。				
修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店 岡山県岡山市北区中島町1-7-8 TEL：086-235-0323		岡山県井原市高屋町127番地の1 医療法人 弘智会 井原第一クリニック 印 院長 宮口直之		
責任技術者		作業者		
				