

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 171024

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 岡山支店 殿	機種	OED-1000S
客先	顧客名	アイシークリニック 様	機番	300178
環営	所在地	香川県善通寺市原田町 1494 番地 1	納入日	平成 26 年 02 月 20 日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日
				平成 29 年 11 月 15 日
計	返送先	納入先と同じ	出荷日	平成 29 年 12 月 13 日
3				

修理依頼・不具合内容

11 月 15 日 オゾナイザ故障、オゾン水生成注意、オゾン水生成異常

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検および作業内容

オゾン発生装置の反応器部分が故障しており、これが原因でオゾン水生成異常が発生しました。 この部品とオゾンガスラインの配管材を交換して復旧しました。

ご使用環境や運転回数から推察して偶発的な故障と考えます。

写真：交換部品一式



[2] 作業内容

- 1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.72ppm・・・正常
- 3：運転確認・・・正常

[3] 出荷時の装置情報

交換後運転回数：9 消毒：9、消毒＋アルコール：95、リークチェック：94
自己洗浄：69、アルコール単独：0、エア単独：2

承認



審査



作成

H29. 12. 15

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	オゾン発生装置	1 台	
	マニホールド周辺チューブ	1 式	
	アスピレータ	1 個	

（株）IHI アグリテック（旧社名 IHI シパウラ）

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528