

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒			製造番号：300178
作業年月日	平成29年9月13日			作業時間：1時間
顧客名	アイシークリニック 様			TEL：0877-62-0118
所在地	香川県善通寺市原田町1494番地1			院長
販売店	株式会社メデイカルサービス			藤井専務
納入年月日	平成26年2月20日	保証期間	内 □ 外 □	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 □	3年 2回目	定期点検シール記入 ☒	
出張引出	修理 □	点検のみ □	その他 □	修理表示貼付 □

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロツク	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライイン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライイン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パル数 602
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライイン	正常 ☒
給水ライイン	正常 ☒	細管送水ライイン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライイン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果 (完了) 暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数：57	(更新) (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒：4	殺菌/消毒+7L：91
	リークチェック：88	自己洗浄：68	7L単独：0	エア単独：1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
おゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
おゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
おゾン水濃度計用ツルメ		☒	1			☒	
オゾンセンサー		☒	1			☒	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

平成29年 9月 13日

ご署名 医療法人社団功寿会 アイシークリニック 印

修理業者

新鋭工業 株式会社 岡山支店

岡山県岡山市北区中島田町1-7-8

TEL：086-235-0323

責任技術者

作業者

