

管理 No.

保守点検・修理 報告書

発行日：平成29年11月01日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300953
作業年月日	平成29年11月1日		作業時間：1時間
顧客名	岡山中央診療所健康管理センター 様		TEL：086-233-2222
所在地	岡山県岡山市北区柳町1丁目13-7		院長 様
販売店	富士フィルムメディカル株式会社		澤久 様
納入年月日	平成28年10月6日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 360
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数：260	更新（リセット）実施・未実施 ☒	殺菌/消毒：436	殺菌/消毒+7L：516
	リークチェック：0	自己洗浄：230	アルコール単独：7	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	バリスタ		☐	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	年 29 月 1 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	〒700-0904 岡山市北区柳町1-13-7
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	ご署名 岡山中央診療所 健康管理センター

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8
TEL：086-235-0323

責任技術者	作業者
	