

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300512
作業年月日	平成30年4月3日		作業時間：1時間
顧客名	のむら内科循環器消化器クリニック 様		TEL：087-816-8088
所在地	香川県高松市香川町川東上字漆原1802-7		院長
販売店	株式会社キタムラメディカル		松原 様
納入年月日	平成27年3月6日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 3年3回目	定期点検シール記入 ☒	
<u>出張・引取</u>	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
定期保守点検実施			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 630
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサ	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	清掃 ☐	殺菌チューブ類
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	殺菌槽コネクタ	正常 ☒
作業結果 <u>完了</u> 、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置情報	交換後運転回数：	229	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒：	8	殺菌/消毒+7L：	710
	リークチェック：	0	自己洗浄：	87	7L単独：	0	エア単独：
交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用7L缶		☒	1	排水7L缶（新型）		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

1730 年 4 月 3 日

ご署名 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8
TEL：086-235-0323

責任技術者	作業者