

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 30年 4月 13日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300269
作業年月日	平成 30 年 4 月 13 日	作業時間： 1.5 Hr
顧客名	はいさ内科医院 様	TEL： 086-272-2593
所在地	岡山県岡山市中区門田屋敷4-4-14	ご担当 様
販売店	株式会社サンキ	ご担当 物部 様
納入年月日	平成 26 年 3 月 26 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4 年 / 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハルス数 300
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

送気送水チューブ交換

装置 情報	交換後運転回数： 187	更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒： 10	殺菌/消毒+アル： 179
	リークチェック： 0	自己洗浄： 153	アルコール単独： 0	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	アルコールキャップ		☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

〒703-8275 岡山市中区門田屋敷4丁目4-14 日

はいさ内科医院

ご署名 院長 羽井佐 茂 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8
TEL：086-235-0323

責任技術者

作業者

