

保守点検・修理 報告書

管理 No.

20180424

発行日：平成30年 4 月 24 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300519
作業年月日	平成 30 年 4 月 24 日	作業時間： Hr
顧客名	はら内科クリニック 様	TEL： 0867-45-7885
所在地	岡山県真庭市久世2399-1	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	平成 27 年 8 月 18 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

H30 保守点検

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ 表示数 251
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒ 劣化
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

異常ありませんでした。

装置情報	交換後運転回数： 503	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒： 14	殺菌/消毒+7L： 491
	リークチェック： 495	自己洗浄： 62	アルコール単独： 3	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	接続コネクタ；リング		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2018 年 4 月 24 日

ご署名

石川 明史

印

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シバウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL:086-944-6528

責任技術者	作業者
	H30.4.24 中澤

安全説明確認カード

オゾン水内視鏡消毒機「OED-1000S」の取扱方法と安全のための注意事項について、下記の納入説明者から説明を受けました。また、取扱説明書および添付文書を熟知するまで読み、その内容を理解して使用いたします。

● 説 明 日	2018 年 4 月 24 日
● お客様ご住所	〒 □□□-□□□□
● お 電 話 番 号	☎ ()
フリガナ ● お客様のお名前 (署名)	月 明

● 販 売 店 住 所	〒 □□□-□□□□
● 販 売 店 名	(株)エバルス ☎ ()

● 納入説明者氏名	新鋭工業(株) 大倉康平
-----------	--------------

● ご購入商品と
製造番号

形式名	製造番号
OED-1000S	300519

【取扱説明書キーポイントチェック欄】

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳
✓	✓	✓	✓	✓	／	／	／	／	／

①メーカー控え
(説明者→(株)IHIアグリテック)

