

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 30年 3月 16日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号： 100261
作業年月日	平成 30年 3月 16日	作業時間： 1.8 Hr
顧客名	ふじわら内科クリニック 様	TEL： 086-250-8070
所在地	岡山県岡山市南区福成 1 丁目167-1	ご担当 様
販売店	共和医理器株式会社	ご担当 吉川 様
納入年月日	平成 23年 4月 4日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 7 年 4 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 420
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

マニホールド周辺チューブを交換しました。

装置情報	交換後運転回数： 800 更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒： 1390	殺菌/消毒+7L： 2459
	リークチェック： 2017 自己洗浄： 431	アルコール単独： 1	エア単独： 5

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤	1	☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側	1	☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側	1	☒	1
オゾン水濃度計用フィル		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	アルコールキャップ		☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

〒702-8022 岡山市南区福成1丁目167-1

医療法人 優しいまなざし

ふじわら内科クリニック

ご署名 院長 藤原 大輔

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8
TEL：086-235-0323

TEL 086-250-8070 FAX 086-250-8071

責任技術者

作業者