

保守点検・修理 報告書


発行日：平成30年8月21日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input checked="" type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input type="checkbox"/>		製造番号：100331
作業年月日	平成30年8月21日		作業時間：
顧客名	ナガヒロ医院 様		TEL：0865-44-5656
所在地	岡山県浅口市鴨方1837-1		院長 様
販売店	角田医療器株式会社		大室 様
納入年月日	平成23年9月26日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>	付属品
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 7年7回目	定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>	
出張 ・引取	修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
フタロック	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌槽 LED	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 308
オゾンセンサ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
水位センサー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
清掃	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/>	電源コード	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
トレイ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	マニホールド周辺チューブ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
作業結果 (完了)、暫定処理など、連絡事項、特記事項			

装置情報	交換後運転回数：220	更新(リセット) <input checked="" type="checkbox"/> 実施・未実施	殺菌/消毒：9	殺菌/消毒+アル：1629
	リークチェック：0	自己洗浄：1582	アルコール単独：0	エア単独：4

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		<input checked="" type="checkbox"/>	1	吸盤		<input checked="" type="checkbox"/>	2
排水栓		<input checked="" type="checkbox"/>	1	接続コネクタ：水槽側		<input type="checkbox"/>	
オゾン水濃度計		<input checked="" type="checkbox"/>	1	接続コネクタ：チューブ側		<input type="checkbox"/>	
オゾン水濃度計用フィルタ		<input checked="" type="checkbox"/>	1	マニホールドチューブ		<input checked="" type="checkbox"/>	1
オゾンセンサー		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	

<p>お客様ご確認署名欄</p> <ul style="list-style-type: none"> 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。 	<p>2018年 8月 21日</p> <p>岡山県浅口市鴨方町鴨方1837番地の1 医療法人ナガヒロ医院</p> <p>ご署名 医師 永廣 格 </p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8
TEL：086-235-0323

責任技術者	作業者
	