

保守点検・修理 報告書

管理 No.

20180516

発行日：平成30年 5 月 16 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300519277
作業年月日	平成 30 年 5 月 16 日	作業時間： 1.5 Hr
顧客名	伊木診療所 様	TEL： 086-429-2300
所在地	岡山県倉敷市亀山775-1	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	平成 26 年 6 月 10 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☒	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
S/S 電源が入らない。お客様のコンセントは100V来ている	
不具合原因、作業内容	
24V 電源、タッチパネルの故障が原因でした	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒ 院内配管	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☐	オゾン水濃度計動作 正常 ☐ バルブ数
オゾンセンサ 正常 ☐	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☐	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒ 3-スなし
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☐
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☐
作業結果 (完了)、暫定処理など、連絡事項、特記事項	
・ 8月が定期保守点検です。よろしくお願ひします。	
・ カラー型タッチパネルになりましたが、使い方は変わりません。	

装置 情報	交換後運転回数： 46 更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒： 5	殺菌/消毒+アル： 300
	リークチェック： 1 自己洗浄： 297	アルコール単独： 0	エア単独： 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		24V 電源、		☒	1
排水栓		☐		タッチパネル		☒	1
オゾン水濃度計		☐				☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐				☐	
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・ 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 三光 ぬぐみ	印

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シバウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 1 7 0 - 6
TEL:086-944-6528

責任技術者	作業者
	2018.5.16 中澤