

保守点検・修理 報告書

発行日：平成30年10月1日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号：100074
作業年月日	平成30年10月1日	作業時間：1時間20分
顧客名	長田医院 様	TEL：0869-22-0001
所在地	岡山県瀬戸内市邑久町豊原341-2	院長 様
販売店	株式会社セイエル	溝口 様
納入年月日	平成22年8月20日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 8年 8回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 546
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐			☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数： 69	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒： 5	殺菌/消毒+7L： 661
	リークチェック： 543	自己洗浄： 642	アルコール単独： 0	エア単独： 6

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールドチューブ		☐	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

〒701-4223 岡山県瀬戸内市邑久町豊原341-2

医療法人社 長田医院

院長 長田 建

ご署名 TEL (0869) 22-0001 FAX (0869) 22-0161

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島町1-7-8
TEL：086-235-0323

責任技術者	作業者
	