

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒			製造番号：301278
作業年月日	平成30年10月24日			作業時間：60分
顧客名	多度津三宅病院 様			TEL：0877-32-2447
所在地	香川県仲多度郡多度津町米町2-1-36			院長
販売店	株式会社メデイカルサービス			松下 様
納入年月日	平成29年10月24日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 / 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目		点検結果
フタロツク	正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 372
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサ	正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チャージ 正常 ☒

作業結果 (完了)、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数：229	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒：34	殺菌/消毒+7L：197
	リークチェック：0	自己洗浄：151	7L単独：0	エア単独：1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用7L用リ		☒	1			☐	
オゾンセンサ		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

※内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

※本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

30年 10月 24日

ご署名

多度津町三宅病院

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8

TEL：086-235-0323

責任技術者

作業者

蒼

川上