

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300950
作業年月日	平成30年8月22日		作業時間：60分
顧客名	池田外科医院 様		TEL：0875-62-3151
所在地	香川県三豊市豊中町笠田笠岡2136		院長
販売店	株式会社メディカルサービス		松下 様
納入年月日	平成28年8月25日	保証期間 内 □ 外 □	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 □	年々回目	定期点検シール記入 ☒
<u>出張・引取</u>	修理 □	点検のみ □	その他 □
			修理表示貼付 □

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目		殺菌槽 LED	正常 ☒
フタロツク	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ 確認数 447
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.64 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺ケーブル	正常 ☒

作業結果 (完了)、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数：127	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒：29	殺菌/消毒+7L：288
	リークチェック：0	自己洗浄：75	7L単独：8	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用ケーブル		☒	1	給水ケーブルのみ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☒	

お客様ご確認署名欄

内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

30年8月22日

ご署名

池田 健一

池田 健一

修理業者

新鋭工業 株式会社 岡山支店

岡山県岡山市北区中島田町1-7-8

TEL：086-235-0323

責任技術者

作業者

大倉

川上