

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号：300280
作業年月日	平成31年2月14日	作業時間：60
顧客名	あしずり脚診療所 様	TEL：0880-87-9100
所在地	高知県土佐清水市天神町1-26	院長
販売店	株式会社末徳屋医療器店 中村出張所	中平
納入年月日	平成26年11月27日	保証期間 内 □ 外 □
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 □ 年々回目 □	定期点検ｼｰﾙ記入 ☒
出張・引取	修理 □ 点検のみ □ その他 □	修理表示貼付 □

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目		点検項目	点検結果
フタロツク	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 535
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサ	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.92 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数：130	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒：3	殺菌/消毒+7L：439
	リークチェック：0	自己洗浄：390	7L単独：0	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
おゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
おゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
おゾン水濃度計用7L用		☒	1	新マニホールドチューブ一式		☒	1
オゾンセンサ		☒	1	新型排水7L用		☒	1

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 TEL 0880-87-9100 FAX 0880-87-9101

〒787-0305 土佐清水市天神町1-26

あしずり脚診療所

奥宮 一矢

修理業者

新鋭工業 株式会社 岡山支店

岡山県岡山市北区中島田町1-7-8

TEL：086-235-0323

責任技術者

作業者

木倉

山